



## STICK PER LO SBIANCAMENTO E L'IGIENE DEI DENTI CLINODENT

Lo STICK CLINODENT è un nuovo sistema di igiene dentale, di rapida efficacia ed inoffensivo per lo smalto dei denti; il suo uso regolare (una volta per settimana), unito al normale uso di spazzolino e dentifricio, elimina efficacemente la placca dentale grazie all'azione pulente della gomma, contribuendo così a prevenire lo sviluppo di carie.

Passando CLINODENT sui denti si possono eliminare le macchie sgradevoli e l'ingiallimento causato da tabacco, the, caffè, coloranti alimentari ecc.

### MODO D'USO

- Lavare bene i denti con spazzolino e dentifricio, prima di utilizzare lo stick CLINODENT.
- Sciacquare la gomma dello stick Clinodent prima e dopo il trattamento.
- Lucidare i denti su tutta la superficie, esercitando una leggera pressione muovendo lo stick verticalmente.
- Se i denti sono molto macchiati, rinnovare il trattamento per più settimane di seguito.
- Lavare bene i denti con spazzolino e dentifricio, dopo aver utilizzato lo stick CLINODENT.
- Usare lo stick fino all'esaurimento della parte conica (4mm circa), per non scoprire il supporto interno.

### AVVERTENZE

**L'uso dello stick Clinodent deve essere limitato ad una volta per settimana.**

Esercitare solo una leggera pressione nell'uso; una maggiore pressione non rende più efficace il trattamento.

Non utilizzare lo stick CLINODENT sulle radici scoperte e dove lo smalto dei denti è particolarmente sottile.

Attenzione: l'uso dello stick CLINODENT è riservato agli adulti; non usare il prodotto sui bambini.

Per una efficace azione antiplacca è necessario lavare bene i denti con spazzolino e dentifricio, dopo aver utilizzato lo stick CLINODENT.

Nei casi eccezionali di denti sensibili, non utilizzare il prodotto e consultare il medico dentista.

**FIMO srl**  
**via Edolo, 40 20125 Milano - Italia**  
**www.fimosrl.it**



A 901362855