

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare la crema adesiva GRIPDENT FORTE è semplice e veloce:

- 1 Pulire accuratamente la protesi dentale preferibilmente con le compresse effervescenti GRIPDENT TABS.
- 2 Applicare sulla protesi asciutta la crema adesiva, mantenendosi lontano dai bordi. (vedi illustrazioni)
- 3 Applicare la protesi e tenerla ferma in posizione per qualche secondo.

Evitare di mangiare e bere per qualche minuto per consentire al prodotto di aderire perfettamente. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.



F.I.M.O. SRL Via Edolo, 40 - 20125 MILANO (ITALIA)

+ FIMO



Ingredienti:
Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer,
Paraffinum liquidum,
Petrolatum, Cellulose gum,
Aroma, C.I. 76470

Precauzioni d'impiego:
Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.
Non utilizzare in caso di ipersensibilità
verso i componenti.
Chiudere bene il tubetto dopo l'uso.